

基因醫學部代送檢清單

收費碼	項目名稱	試管別	注意事項	處理步驟
F12187C	STR polymorphism analysis	紫頭管	冷藏。 參見SOP-LAB-QP-0501-2-Appendix 八	1.分院轉檢送件 2.檢驗查單一式三聯，需填寫採檢時間及採血者。 3.手動開單，送出2聯，留存1 聯。 4.通知院內交通車送檢
F25007B	Cytogenetics Study(含染色體檢查)			
FCHBLO	Blood chromosome study(單人)	綠頭管(至少3ml)	1.不可離心，需冷藏。 2.傳送前與運輸組組長(MVPN678309)確認當日幾點送檢，若送到時間於基因醫學部下班時段，則交班給隔天B1F工作職責A(上午10點前)再Call組長 3.司機傳送檢體時，提醒務必在週一至週五16:30前、週六10:00前送至中華院區(基因醫學部)。	
FCHOSIH1	Fluorescence in Situ Hybridization 單一FISH項目檢測	綠頭管(抽滿)		
FCHOISH2	Fluorescence in Situ Hybridization (合併F25007B使用)	綠頭管(至少3ml)		
FCHOISH6	FISH檢測	綠頭管(抽滿)		
FCHPCA	Produt of conception chromosome study	有單有檢體(Tissue)		
FGTNIPS	非侵入性染色體分析_微缺失	NIPT專用玻璃管 (10ml)	1.室溫。 2.傳送前與運輸組組長(MVPN678309)確認當日幾點送檢，若送到時間於基因醫學部下班時段，則交班給隔天B1F工作職責A(上午10點前)再Call組長 3.司機傳送檢體時，提醒務必在週一至週五16:30前送至中華院區(基因醫學部)。 4.週六可採檢，於下週一傳送。	
FMGNIPT	非侵入性染色體分析	NIPT專用玻璃管 (8~10ml)		

FMGACGH	高解析度基因體雜交比較技術(array-CGH)	血液-紫頭管 (3C.C)； 羊水-空針(Heparin rinse羊水10-15c.c)	冷藏(可週六採檢週一傳送) (彰基基因醫學分生組##01-2331雅君)	
FMGACTB	遺傳性乳癌BRCA1/2基因檢測	血液-紫頭管 10C.C	室溫(可週六採檢週一傳送)	
FMGACTR	遺傳性癌症風險基因檢測(32基因)	血液-紫頭管 10C.C	室溫(可週六採檢週一傳送)	
FMGAPL	PML/RAR α 基因融合篩檢	紫頭管	冷藏	
FMGAPOE	APOE genotyping (APOE基因分型)	紫頭管	冷藏(可週六採檢週一傳送)	
FMGCSC	高解析度基因體雜交比較技術(aCGH)	血液-紫頭管 (3C.C)； 羊水-空針(Heparin rinse羊水10-15c.c)	冷藏(可週六採檢週一傳送) (彰基基因醫學分生組##01-2331雅君)	
FMGFRA	X染色體脆折症檢測(螢光片段分析法)	紫頭管	冷藏	
FMGHBA	8種常見甲型地中海貧血之基因篩檢	紫頭管	冷藏	
FMGHBB	HBB(beta-thalassemia) Mutation Analys	紫頭管	冷藏	
FMGHL6	Hearing loss screening for 6 hotspot mutants 聽力基因6突變熱點篩檢	紫頭管	冷藏	
FMGJAK	JAK2基因V617F突變點篩檢	紫頭管	冷藏	
FMGBCRQ	BCR/ABL 融合基因定性	紫頭管*4	冷藏，皆需抽滿3mL	
FMGBCRP	BCR/ABL 融合基因定量	紫頭管*4	冷藏，皆需抽滿3mL	
FMGLCP	液態活檢癌症監控基因檢測(50基因)	ACT Monitor 專用採血管	預約制。門診-留下患者病歷號及聯絡電話，交班由 亦婷或沛庭小組長或門診檢驗組技術組長 與患者聯絡。病房-留下患者病歷號及病房單位，交班由 亦婷或沛庭小組長或技術組長 與護理人員接洽。(不收單)	檢體室溫保存傳送，可週六採檢週一送。 (彰基基因醫學分生組##01-2331楊小姐)
FMGLFO	液態活檢FoundationOne Liquid基因檢測(70基因)	FoundationOne Liquid專用採血管*2	預約制，由業務與 亦婷或沛庭小組長或門診檢驗組技術組長 接洽。	檢體室溫保存傳送，立即傳送(由業務人員傳送)。 (彰基基因醫學分生組##01-2331楊小姐)

FMGLLU	液態活檢肺癌監控基因檢測(11基因)	ACT Monitor 專用採血管	預約制。門診-留下患者病歷號及聯絡電話，交班由 亦婷或沛庭小組長或門診檢驗組技術組長 與患者聯絡。病房-留下患者病歷號及病房單位，交班由 亦婷或沛庭小組長或門診檢驗組技術組長 與護理人員接洽。 (不收單)	檢體室溫保存傳送，可週六採檢週一送。 (彰基基因醫學分生組##01-2331楊小姐)
FMGSEA	甲型地中海貧血SEA亞型篩檢	紫頭管	冷藏	1. 分院轉檢送件 2. 檢驗查單一式三聯，需填寫採檢時間及採血者。 3. 手動開單，送出2聯，留存1 聯。 4. 通知院內交通車送檢
FMGSMA	脊髓性肌肉萎縮症分子檢測	紫頭管	冷藏	
FMGWDM	威爾森式症(ATP7B基因)之全基因定序篩檢	紫頭管	冷藏	
FMGF9	Hemophilia B-F9 mutation screening B型血友病【第九凝血因子】基因定序分析	紫頭管*1	室溫或冷藏(48小時)	
FMGTTR	家族性澱粉樣多發性神經病變-TTR基因突變篩檢	紫頭管*1	室溫或冷藏(48小時)	
FMGTP53A	全基因突變檢測	紫頭管*1	室溫或冷藏(48小時) 週一至週五16:30前送達中華院區(基因醫學部)	
FPTAML	AML-MRD	紫頭管X6管	皆需抽滿3cc。 參見SOP-LAB-QP-0501-2-Appendix八	
FPTCML	BCR/ABL 分子檢驗	紫頭管X4管	皆需抽滿3cc。 參見SOP-LAB-QP-0501-2-Appendix八	
FPTMSI	MSI基因檢測	有單無檢體 (檢體在CCH)	參見SOP-LAB-QP-0501-2-Appendix八	
FMGCTCM	循環腫瘤細胞數量檢測	CTC專用管(迷彩頭)	室溫存放，不可離心。 參見SOP-LAB-QP-0501-2-Appendix.十五	1. 分院轉檢送件 2. 檢驗單一式三聯 3. 手動開單，送出2聯，留存一聯。 4. 檢測申請單複印一份留存 5. 通知院內交通車傳送資料至彰基基因醫學部，檢體由業務聯絡黑貓傳送。

